

Por favor, siga las siguientes instrucciones cuidadosamente

1. Ponga el tapete inductivo en un lugar adecuado como un sillón o silla, sofá o similar.
2. Conecte el tapete al Univox 1A.
3. Conecte la radio o televisión al Univox 1A de acuerdo con la figura 1 a 3.
4. Encienda la TV/Radio.
5. Enchufe el Univox 1A a la toma de corriente.

Si usa tapete inductivo:

Ajuste la prótesis a la posición T o MT. La luz verde indica que el sistema funciona bien. La lámpara parpadea con las inflexiones del sonido.

Si usa Auriculares:

Ajuste el control de volumen.

